

# MASQUES CHIRURGICAUX - Type IIR

enfants 4-12 ans

## Mode d'emploi :

1. Assurez-vous que le masque soit tourné dans la bonne direction (bord rigide en haut, face blanche vers vous).
2. Déployez et placez le masque sur votre visage de façon à couvrir à la fois le nez, la bouche et le menton.
3. Passez bien les élastiques autour des oreilles.
4. Ajustez le masque et appuyez sur la barrette nasale sur la racine du nez pour que le masque soit bien plaqué sur votre visage.



## Précautions :

1. Avant de toucher le masque, se laver et se désinfecter les mains.
2. Changer le masque régulièrement toutes les 4 heures.
3. Changer le masque si celui-ci est humide, endommagé ou ne tient plus correctement contre votre visage.
4. Après utilisation, jeter le masque dans une poubelle fermée.
5. Après tout contact avec le masque usagé, se laver et se désinfecter les mains.
6. Vérifier que la taille du masque est adaptée à votre enfant. Demander conseil à votre pharmacien.

## Usage unique.

Importateur :

**Pharma Lab SAS**

1 bis, rue du Havre 75008 Paris - FRANCE



**Pharma Lab Int'l Ltd.**

Unit 2102, CC Wu Building

302-308 Hennessy Road

Wan Chai, Hong Kong



**Pharma Lab SAS**

1 bis, rue du Havre 75008 Paris, France

